



ONDERHOUD

LUIDSPREKERSYSTEEM MET MAATSTUKJE

Uw hoortoestel komt dagelijks in contact met stof, vocht en bacteriën. Voor een optimale werking is het belangrijk om dagelijks uw hoortoestel te reinigen. Dit vraagt slechts enkele minuten tijd.

Kom elke drie maanden langs voor een grondige reiniging. Zo kunnen we u een goede geluidskwaliteit en optimaal gebruik van uw toestel garanderen. U kan hiervoor online een afspraak maken, zo hoeft u niet te wachten.

1. Schoonmaken

Bij Hoorcentrum Aerts vindt u reinigingsdoekjes die gemaakt zijn om hoortoestellen proper te maken en te desinfecteren zonder de kleur van uw hoortoestel aan te tasten. Neem een doekje uit de doos, ga ermee over uw hoortoestel en verwijder het zichtbare vuil.




VOCHTIGE DOEKJES
Doekjes om uw hoortoestel schoon te maken.




REINIGINGSVLOEISTOF
Breng op een doekje aan en maak uw hoortoestel schoon.

2. Vrijmaken van de geluidsweg: vervangen van de filter


De luidsprekerfilter zorgt ervoor dat uw hoortoestellen extra beschermd worden. Wanneer de geluidsweg niet volledig vrij is, zal uw hoortoestel verzwakt klinken. Daarom moeten de filters regelmatig vervangen worden. Vraag de correcte staafjes bij uw audioloog.

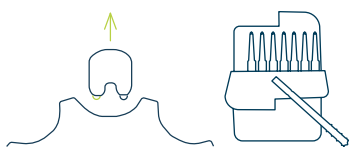

Haal een staafje of rondje met filter uit het doosje.

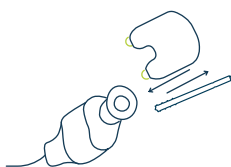

Gebruik de kant zonder filter om de oude filter uit de luidspreker te halen. Hiervoor is vaak een draaibeweging nodig.

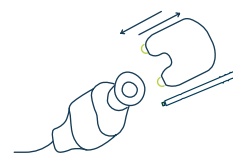

Draai het staafje vervolgens om en duw de nieuwe filter erop. Trek het staafje er weer uit en de filter is vervangen.

* Wanneer u een universele dome (dopje) op de luidspreker heeft staan, zal u die eerst van de luidspreker moeten halen om de filter te vervangen.

Nog vragen? Neem contact op met uw audioloog | 0800 11 117 | info@hoorcentrumaerts.be



3. Drogen

Wanneer u uw hoortoestel draagt, wordt het blootgesteld aan vocht, zoals regen en zweet. Een hoortoestel bestaat grotendeels uit elektronica, daarom is het van essentieel belang dat dit niet vochtig wordt. Om ervoor te zorgen dat uw hoortoestel in optimale conditie blijft, is het raadzaam om het elke avond te drogen. Dit kan met een droogtablet of een droogbox.



DROOGDOOSJE
Voor het drogen met droogtabletten.



DROOGTABLETTEN
Om uw hoortoestel dagelijks te drogen.



DROOGBOX
Elektrisch droogstelsysteem met UV-filter om te desinfecteren.


3.1 Droogbox

Oplaadbare hoortoestellen kunnen met een combinatie-toestel gelijktijdig laden en drogen.

Heeft u een hoortoestel met batterijen?

1. Neem de batterij uit uw hoortoestel.
2. Leg de hoorapparaten in uw droogbox.
3. Duw op de startknop zodat de lampjes erboven branden, de eerste minuten zal er een UV-lampje de bacteriën op uw toestel verwijderen. Daarna zal door de circulatie van warme lucht het vocht verdampen.


3.2 Droogtablet

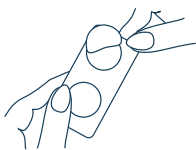

Neem uw droogtablet uit de verpakking. Zorg ervoor dat het kartonnetje steeds gesloten blijft.



Heeft u geen oplaadbaar hoortoestel? Neem dan de batterij uit uw hoortoestel.

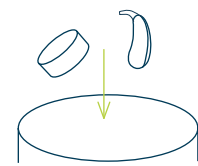

Leg de tablet en uw hoortoestel in een droogdoosje of lader van uw hoortoestel. Sluit uw doosje of lader goed. Laat dit een hele nacht liggen. Vervang de droogtablet na een maand, wanneer de kleur wit wordt.